

SAN-UP®

Humidificador
Ultrasónico
Cód.3283



LÍNEA RESPIRATORIA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

Para habilitar la garantía:

Registre su Producto

ingresando a:

www.sanup.com.ar

Registro de Producto y
complete el formulario.

Gracias



Índice

Introducción2
Características3
Precauciones y Seguridad4
Precauciones de Operación5
Notas6
Familiarícese con el Humidificador7
Elección de Ubicación Adecuada8
Instrucciones de Llenado9
Instrucciones Operativas10
Control de Luz de Noche LED11
Cuidados del Humidificador12
Limpieza del tanque de agua13
Especificaciones Técnicas14
Detección de Fallas15

Introducción

Un Humidificador Ultrasónico atomiza agua en partículas ultra finas de 1-5 μm utilizando el principio de oscilación ultrasónica de alta frecuencia y esparce vapor de agua fresca al aire a través de un flujo de aire con el fin de equilibrar la humidificación ambiente. La tecnología ultrasónica es una tecnología muy consolidada que ha sido ampliamente aplicada a distintas áreas.

Características

1. Está diseñado especialmente para humidificar el aire con vapor fresco empleando oscilación de alta frecuencia.
2. Posee una luz de noche LED de Siete Colores, que puede programarse para iluminar con su color favorito o cambiar de color.
3. El flujo de vapor regulable hace que pueda controlar la humidificación de su ambiente.
4. El Difusor Aromático le permite esparcir el aroma de su predilección a base de agua o aceite.
5. La operación silenciosa garantizará que sus seres queridos logren descansar de la mejor manera posible.
6. Le brindará 10 horas de uso continuo si funciona a la tasa de flujo máxima. Si funciona a una tasa de flujo baja, rendirá 20 horas de uso.
7. Le dará la tranquilidad de contar con 1 año de garantía.

Precauciones y seguridad

1. No cambie el cable de corriente sin autorización. Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
2. No enchufe con las manos mojadas, de lo contrario correrá el riesgo de descarga eléctrica.
3. Si la carcasa está inclinada, manipule con la corriente interrumpida.
4. No toque el Oscilador al arrancar ya que podrá ocasionarle dolor.
5. No desarme la unidad sin desconectar el suministro eléctrico para evitar una descarga.
6. No desarme la base principal para reparar la unidad o limpiarla usted mismo.
7. No reemplace el cable de corriente usted mismo.
8. Mantenga todo líquido dañino, tal como limpiadores, fuera del alcance de los niños para evitar el ingreso a la unidad por error.
9. Cualquier modificación o reparación de la unidad sin el permiso final de nuestra fábrica puede dañar el humidificador y significar un peligro para el usuario.
10. Si la unidad genera un sonido u olor anormal durante el funcionamiento, apáguelo inmediatamente y desconéctelo de la toma de corriente.
11. Todas las reparaciones deben ser efectuadas por un reparador autorizado.
12. Antes de limpiar o desplazar la unidad, apáguela o desconéctela.
13. No opere la unidad cuando el tanque de agua esté vacío.
14. No rasguñe el oscilador ultrasónico con un objeto pesado.
15. No deje que corra o salpique agua en la base para evitar dañar las partes internas de la unidad.
16. Coloque la unidad sobre un lugar firme y plano, evite la inclinación y manténgala derecha.
17. Coloque la unidad alejada de fuentes de calor, tales como hornallas, y evite la luz solar directa.
18. Evite el rocío directo de bruma sobre mobiliario y artefactos eléctricos.
19. Coloque la unidad a temperatura ambiente normal. Evite el funcionamiento de la unidad en ambientes fríos para evitar dañar la unidad. Si en el interior del ambiente está congelado, no encienda la unidad hasta que el hielo se haya derretido o eliminado.


Precauciones de operación

1. No agregue agua caliente a más de 45°C al tanque de agua para evitar decoloración o distorsión.
2. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C, vacíe el tanque de agua y el recipiente de agua. El congelamiento del agua puede dañar los componentes.
3. No coloque metales, químicos y detergentes en el tanque de agua.
4. No coloque el aceite aromático directamente en el tanque de agua o recipiente de agua del humidificador.
5. Cuando haya exceso de agua en el recipiente de agua, no lo mueva para evitar derrames.
6. Mantenga alejado de mobiliario que pueda dañarse con la humedad y los artefactos eléctricos.
7. No agregue agua al recipiente de agua directamente.
8. Cuando la unidad no sea utilizada durante un período prolongado, desenchúfela.
9. Nunca descargue el agua remanente en el recipiente de agua sin apagar la unidad.
10. Cuando el tanque de agua está lleno, la unidad puede funcionar durante 9 - 11 horas a la tasa de flujo máxima.

Notas


A large rectangular box with a black border, containing 18 horizontal lines for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the box.

Familiarícese con el Humidificador

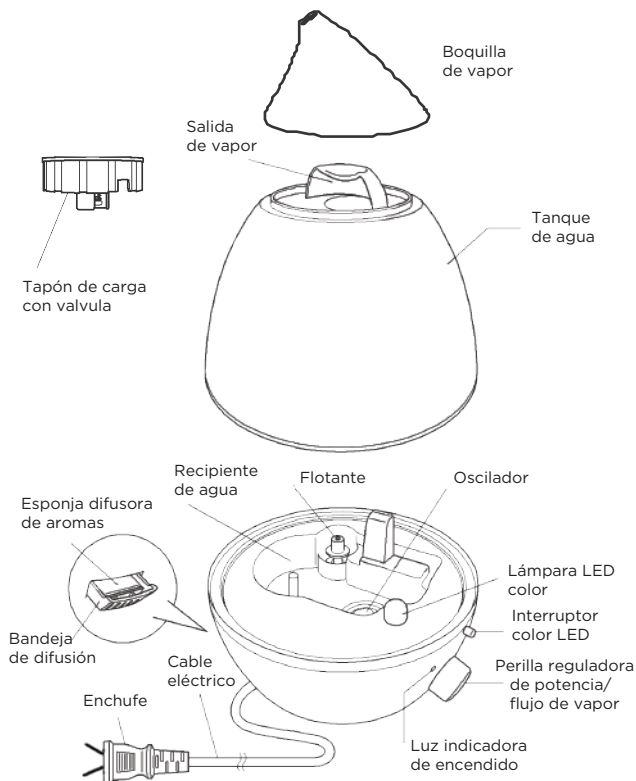


Elección y ubicación adecuada


No dirija el flujo de vapor a las paredes o mobiliario sensible a la humedad. Regule el flujo de vapor al nivel de confort necesario y adecuado a la dimensión del ambiente.

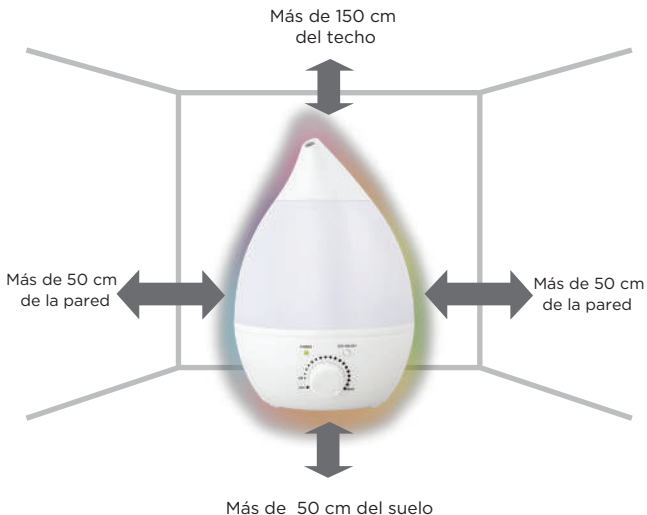


Instrucciones de llenado

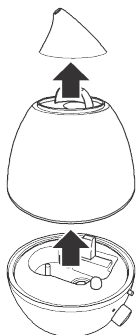


1. Retire la boquilla de vapor del tanque de agua.

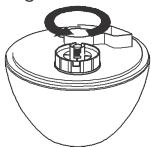

2. Invierta el tanque de agua y gire el tapón en sentido antihorario.

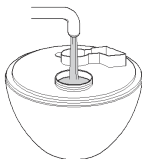

3. Llene el tanque con agua limpia a temperatura ambiente.
“NO AGREGAR ESENCIAS EN EL AGUA”

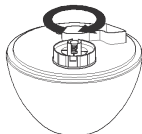


4. Enrosque el tapón, limpie el exceso de gotas de agua alrededor del tanque de agua.




5. Vuelva a colocar el tanque de agua en la base. Asegure la boquilla al tanque de agua.

Instrucciones de operación


1. Gire la perilla de control principal en sentido horario. La luz indicadora de encendido se encenderá en verde y comenzará la humidificación.

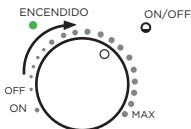


2. Regule el nivel de humidificación girando la perilla de control de encendido/ humidificación. El nivel de vapor de humidificación aumenta al girar la perilla en sentido horario.

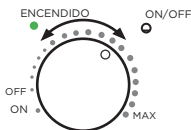

3. Cuando el indicador LED titila en Rojo, el nivel de agua es bajo. Se detendrá la humidificación. Apague y desenchufe la unidad. Vuelva a llenar el tanque de agua según las instrucciones anteriores.

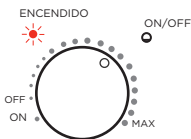


4. Para detener la humidificación, gire la perilla de control de vapor principal en sentido antihorario hasta escuchar un clic, lo que indicará que el interruptor está apagado. La luz LED también se apagará.

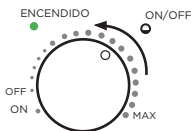


Control Luz de Noche

1. La luz de noche, se enciende al presionar el botón LED ON/OFF. Las luces LED cambiarán según el ciclo indicado a continuación.

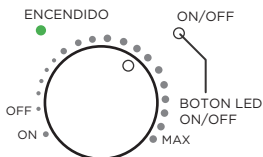

Uso como Difusor de Aromas

1. Retire la bandeja de difusión de aroma en la parte posterior.
2. Embeba la esponja difusora de aroma con su aroma favorito a base de aceite o agua.
3. Vuelva a colocar la bandeja de difusión de aroma.
4. Siga las instrucciones de llenado (pág. 9).
4. Encienda el humidificador y disfrute del aroma.

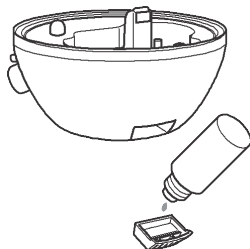

IMPORTANTE!

No agregar esencias al tanque de lo contrario invalida la garantía.

Cuidados del Humidificador


Precaución



Antes de limpiar o mantener el humidificador, apague y desenchufe de la corriente.


Cuidados de la carcasa

1. Retire la boquilla y el tanque de agua
2. Con un paño limpio, limpie la suciedad acumulada y el exceso de agua de la parte superior del recipiente.

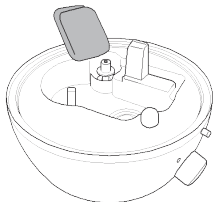


Cuidados del oscilador

1. Retire la boquilla y el tanque de agua.
2. Elimine el exceso de agua del recipiente del humidificador.
3. Con un cepillo dental suave, limpie la superficie metálica del oscilador
4. Enjuague bien con agua limpia.
5. Seque correctamente.

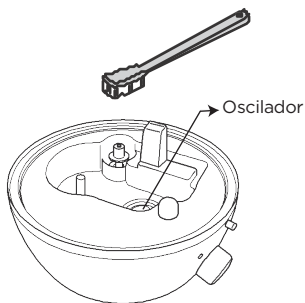


Limpieza del tanque de agua

1. Retire la boquilla y el tanque de agua
2. Retire el tapón.
3. Limpie el tanque con solución de vinagre diluida.
4. Enjuague muy bien, asegurándose de no dejar residuos de limpieza del tanque de agua.
5. Seque correctamente.
6. Conserve en el envase original si no lo utiliza durante un período prolongado.

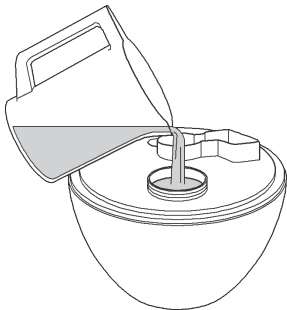

Precaución

Si emplea un limpiador comercial, siga las instrucciones exactas del fabricante.

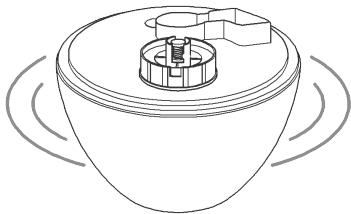

Especificaciones Técnicas

Nombre del Modelo	Cód. 3283
Tensión nominal	AC 220 - 240V 50/60Hz
Consumo energético	22 W
Flujo de chorro máximo	280 ml / hora
Capacidad del tanque de agua	2,8 Litros
Tiempo de uso continuo	Aproximadamente 10 horas a tasa de flujo máxima
Dimensiones externas	200 (W) x 207 (D) x 291 (H) mm
Peso	0,98 Kg
País de fabricación	China

Detección de fallas

Si detecta inconvenientes al utilizar el humidificador, refiérase a esta guía para resolver el problema. En caso de persistir, contáctese con el departamento de servicios al cliente: 0810-77-72687	
Problemas	Consejos
No enciende	El cable está desconectado. Conecte a una fuente eléctrica.
<ul style="list-style-type: none">•El humidificador no funciona.•El humidificador no emite suficiente vapor.	<ul style="list-style-type: none">• El tanque de agua no tiene suficiente agua. Rellene el tanque de agua.• Asegúrese de que el humidificador esté colocado sobre una superficie horizontal nivelada y el tanque esté instalado correctamente.• Asegúrese de que la perilla de control variable esté en la posición correcta.• Asegúrese de que no haya polvo o minerales acumulados en el oscilador.• Asegúrese de que el flotante funciona correctamente.• Si no se produce vapor, controle que el oscilador no esté dañado.
<ul style="list-style-type: none">•El vapor tiene mal olor.	<ul style="list-style-type: none">• El recipiente y el oscilador del humidificador pueden estar sucios. Límpielos según las instrucciones.• Cambie el agua usada y coloque agua limpia.
<ul style="list-style-type: none">•Hay una filtración de agua.	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste el tapón de carga.• Es posible que el tanque de agua esté mal colocado. Vuelva a colocarlo.

IMPORTA Y GARANTIZA SAN UP S.A.
Ruta 8 N.° 2967 (B1651GVI) San Martín- Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4754-4000 - Fax: (54-11) 4754-4004
atencionalcliente@sanup.com.ar
Visite nuestra página Web y encontrará información detallada sobre
nuestros productos y servicios www.sanup.com.ar
ORIGEN CHINA

Humidificador Ultrasónico

Cód. 3283



GARANTÍA

Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

Fecha:...../...../.....

Casa Vendedora:...../...../.....

Sello y Firma:...../...../.....

El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.

Importa y garantiza San Up S.A.:
Ruta 8 N°2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires, Argentina

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura de compra, de lo contrario no tendrá validez.

- Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Services Autorizados por San Up S.A.
- Durante la vigencia de la Garantía los gastos de traslados se registrarán por la Ley 24,240.
- El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días a partir del período de cumplimiento efectuado por el usuario.

Para obtener la dirección de nuestros servicios técnicos autorizados ingrese a www.sanup.com.ar ó comuníquese con el Servicio de Atención al Consumidor al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200 .
Tel.: (54-11) 4754-4000 - Fax: (54-11) 4754-4004
atencionalcliente@sanup.com.ar

HUMI/43030/R03/2422

