

SAN-UP®

Vaporizador Humidificador

3077



MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

Para habilitar la garantía:

Registre su Producto

ingresando a:

www.sanup.com.ar

Registro de Producto y
complete el formulario.

Gracias



Índice

Introducción3
Recomendaciones Importantes4
Descripción de partes5
Instrucciones de uso5
Inhalaciones con sustancias balsámicas6
Comentarios importantes6
Limpieza y Mantenimiento7
Anomalías y Correcciones9
Especificaciones Técnicas10
Explicación de los Símbolos11
Servicios Técnicos12

Introducción

¡Felicitaciones por la compra del Vaporizador Humidificador San Up! Gracias por su confianza.

San Up S.A. garantiza que este producto ha sido fabricado con materiales de primera calidad y cumple con las normas de seguridad vigentes, nacionales e internacionales.

Si usted tiene alguna duda o comentario con respecto a este equipo, por favor comuníquese con San Up S.A. a través de nuestro Servicio de Atención al Consumidor: 0810-77-SANUP (72687).

IMPORTANTE:

Para habilitar la garantía:

Registre su Producto ingresando a: www.sanup.com.ar


Registro de Producto y complete el formulario.

Gracias



Recomendaciones importantes

- 1- Lea el Manual de Uso cuidadosamente antes de utilizar el aparato y guárdelo para cualquier consulta ulterior.
- 2- Este equipo sólo se deberá utilizar para la función específica para la cual fue creado: la vaporización. Todo uso diferente al que corresponde, se debe considerar inadecuado y por consiguiente peligroso; el fabricante no se puede considerar responsable de los perjuicios causados por uso indebido, incorrecto e irracional, o si el equipo se ha utilizado en instalaciones eléctricas no conformes a las normas de seguridad vigentes.
- 3- No altere el cable de conexión del equipo.
- 4- **No use el aparato con corriente continua.**
- 5- Siempre desenchufe el vaporizador del tomacorriente antes de extraer, llenar o limpiar la unidad de calentamiento o cuando no la utilice.
- 6- No vierta ninguna clase de sustancia en el agua del depósito (puede dañar la unidad y anular la Garantía).
- 7- Coloque el vaporizador en una posición segura, no lo coloque sobre una silla, mesa u otro mueble; proteja el piso o la alfombra colocando el vaporizador sobre una superficie resistente al calor que no sea de metal.
- 8- **No dirija el vapor directamente al paciente ya que puede ocasionarle quemaduras (el paciente recibirá el nivel deseado de humedad desde donde está), ni tampoco a los objetos ya que puede dañarlos.**
- 9- **Coloque agua y sustancias balsámicas nuevas cada vez que utilice el vaporizador. Siempre vacíe el agua remanente y enjuague la unidad de calentamiento y el depósito, a fin de eliminar los residuos minerales.**
- 10- Mantenga el vaporizador fuera del alcance de los niños.
- 11- Ventile la habitación periódicamente. No deje de observar el vaporizador mientras esté en funcionamiento en habitaciones cerradas o pequeñas ya que la humedad excesiva puede producir condensación en las paredes.
- 12- No levante ni mueva el vaporizador mientras esté enchufado.
- 13- Para trasladar el vaporizador tómelo desde la parte inferior de la base.
- 14- Desenrede el cable de alimentación antes de usarlo.
- 15- **Esta unidad debe ser reparada únicamente por personas autorizadas por San Up S.A. (ver Lista de Services) o bien comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Consumidor: 0810-77-SANUP (72687).**

Descripción de partes

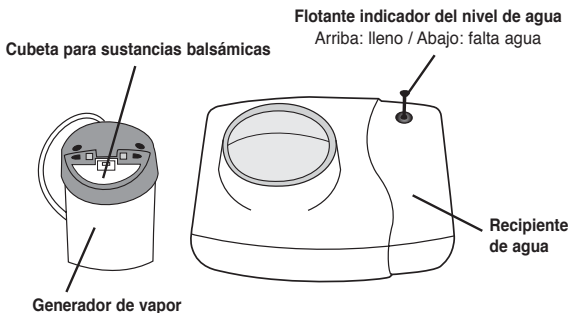

Instrucciones de uso

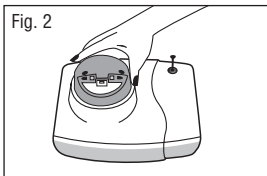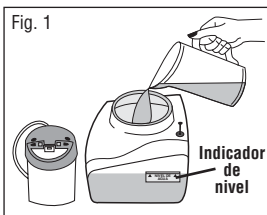

1- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado.

2- Extraiga el generador de vapor.

3- Llene el recipiente **con agua de la canilla** hasta donde marca el indicador de nivel (ver Fig.1). No llene en exceso. **Importante: No utilice agua filtrada o purificada.**


4- Coloque nuevamente el generador de vapor y oprima la tapa durante 10 segundos a fin de permitir que el agua ingrese a la cámara de calentamiento (ver Fig.2).

5- Enchufe el aparato. El vapor comenzará a salir luego de unos minutos.

6- Una vez consumida el agua en contacto con los electrodos, el vaporizador se detendrá automáticamente.

Inhalaciones con sustancias balsámicas y/ o aromáticas

Fig. 3

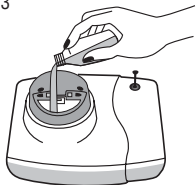

Introducir en la respectiva cubeta las sustancias balsámicas y proceder según lo indicado en el capítulo “Instrucciones de uso” (ver Fig.3).


IMPORTANTE: DENTRO DEL RECIPIENTE NO DEBE INTRODUCIRSE NINGUNA SUSTANCIA QUE NO SEA AGUA.

Comentarios importantes

Coloque agua y sustancias balsámicas nuevas cada vez que utilice el vaporizador. Siempre vacíe el agua remanente y enjuague la unidad de calentamiento y el depósito, a fin de eliminar los residuos minerales y obtener una vaporización eficiente. Seque el aparato antes de guardarlo.

1-Respiraderos de Seguridad: están ubicados en los dos lados del orificio de salida del vapor. Cuando hay hervidero rápido y el funcionamiento está por finalizar, el vapor puede salir por los respiraderos. Esta operación es normal y evita que el agua se caliente en exceso, liberando la presión del vapor (ver Fig.4).

Fig. 4

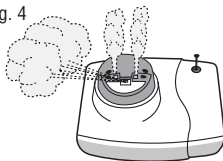

2- En algunas localidades, el agua y la parte inferior del recipiente pueden mancharse durante el funcionamiento. Este fenómeno se debe habitualmente al tipo de agua, es normal y no afecta la pureza del vapor o del medicamento. El recipiente puede limpiarse fácilmente con agua y jabón. Enjuague y seque el recipiente después de limpiarlo.

3- Como una condición de venta, el comprador asume la responsabilidad de mantener y utilizar en forma adecuada este aparato, de acuerdo con nuestras instrucciones impresas. El comprador o el usuario debe determinar por sí mismo cuándo utilizar el aparato y por cuánto tiempo.

Limpieza y mantenimiento

Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla. Extraiga la unidad generadora de vapor dejando que el agua drene en el recipiente.

Mantenimiento diario:

Vacíe el agua no utilizada del recipiente de agua. Enjuáguelo muy bien con agua, déjelo escurrir y séquelo con un paño seco y limpio.

Mantenimiento semanal:



Vacíe el agua no utilizada del recipiente de agua. Enjuáguelo muy bien con agua, déjelo escurrir y séquelo con un paño seco y limpio. Sumerja la unidad generadora de vapor durante 10 minutos en un recipiente con vinagre blanco hasta cubrir aproximadamente la mitad (ver Fig.5).

Luego, cubriendo con los dedos los orificios inferiores de la unidad generadora de vapor, agregue agua de la canilla en la salida del vapor. Cubra la salida del vapor con los dedos de la otra mano, agite enérgicamente y luego vacíe el agua.

Repita esta operación varias veces.

Limpiar los electrodos cada 150 horas de funcionamiento:

Extraer los 2 tornillos de la tapa superior. Separar la tapa superior, el montaje de la tapa interior y el alojamiento (no extraer la placa protectora del cordón de la tapa interior). Utilizando un cuchillo, raspar suavemente los electrodos a fin de eliminar el material depositado (ver Fig.6). (Si fuera necesario, el material depositado se puede ablandar dejando la unidad sumergida en vinagre blanco durante toda la noche).

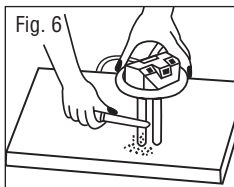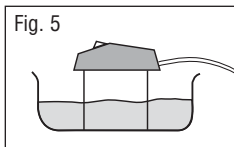


Fregar el interior del alojamiento. Enjuagar la unidad después de limpiarla. Volver a montar el conjunto, alineando las ranuras y los pernos de guía de las tapas y el alojamiento (ver Fig.7). Volver a colocar y ajustar los 2 tornillos.

IMPORTANTE: NO AJUSTAR EXCESIVAMENTE LOS TORNILLOS.

Asegúrese de que la salida del vapor, los respiraderos de seguridad (ubicados en los dos lados de la salida del vapor) y los orificios de entrada del agua ubicados en la parte inferior de la unidad generadora de vapor estén abiertos y sin obstrucciones. Si así fuera, límpielos con un mondadientes.

Mantenimiento al final de la temporada:

Siga el procedimiento de Mantenimiento Semanal al final de la temporada o cuando no vaya a utilizar el vaporizador por varios días. Asegúrese de sacar todas las piezas y de conservarlas en un lugar fresco y seco. **NO GUARDE EL APARATO CON AGUA.**

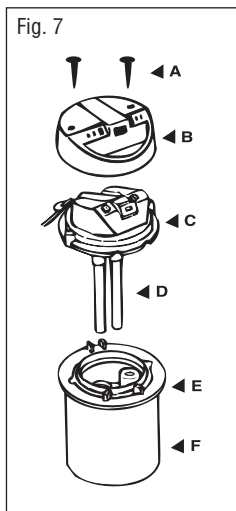

Anomalías y correcciones

Si sucediera algo fuera de lo normal durante el uso, por favor verifique y corrija los siguientes puntos:

Anomalía	Posible causa	Solución
Luego de enchufar no genera vapor.	1-Mal enchufado. 2-Falta de energía eléctrica.	1-Controlar que esté bien enchufado al tomacorriente. 2-Verificar la existencia de energía eléctrica.
Emite vapor en forma muy lenta.	1-Orificio de salida de vapor obstruido. 2-Orificios de entrada de agua ubicados en el fondo del espacio de ebullición, obstruidos. 3-Acumulación excesiva de minerales en los electrodos.	1-Quitar elementos de obstrucción. 2-Limpiar con un mondadientes y asegurarse de que queden libres estos orificios. 3-Realizar la limpieza de los electrodos de acuerdo al capítulo de "Limpieza" de este Manual.
Emite cantidad excesiva de vapor, titilan luces o los fusibles se funden.	Exceso de sales minerales en el agua de su zona o pozo propio.	Vacíe el recipiente, enjuáguelo bien y vierta mitad de agua destilada y mitad de agua de la canilla.

Si aún siguiendo las instrucciones persistiera la anomalía, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Consumidor: 0810-77-SANUP (72687)

Especificaciones Técnicas

Método de vaporizado.....	Paso de corriente eléctrica
Tensión de operación.....	220V - 240V ~ 50Hz
Clase.....	<input type="checkbox"/>
Potencia	520 W
Consumo.....	2,25 A
Capacidad del recipiente.....	4 litros
Tiempo de evaporado.....	6 a 8 horas*
Peso.....	0.820 kg
Dimensiones del aparato.....	300 x 230 x 160 mm
Temperatura y humedad de operación.....	5° a 40° C, 30% a 95% RH
Temperatura y humedad de almacenamiento.....	-10° a 40° C, 10% a 95% RH
Rango de presión atmosférica para transporte y almacenamiento.....	500-1060 mb


*Las especificaciones y el diseño exterior pueden estar sujetos a cambios por mejoramientos sin aviso previo.


*El tiempo de evaporado podrá variar de acuerdo al porcentaje de sal en el agua: a mayor porcentaje de sal menor será el tiempo de evaporado.

Recuerde **siempre** utilizar agua de red (agua corriente).

Explicación de los símbolos

Corriente alterna..... 

Clase II..... 

Cuidado, vapor caliente que
puede producir quemaduras..... 
Ver instrucciones.

Tipo B..... 

Visite nuestra página Web y encontrará información detallada sobre nuestros productos y servicios: **www.sanup.com.ar**

Hecho en Argentina.

Producido por **SAN UP S.A.** 

Ruta 8 N.º 2967 (B1651GVI) San Martín, Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54-11) 4754-4000 / Fax: (54-11) 4754-4004

Si desea información detallada sobre nuestros productos y servicios, contáctenos:



www.sanup.com.ar

sanup@sanup.com.ar



0810-77- SANUP (72687)

Vaporizador Humidificador

3077

SAN·UP



GARANTÍA

Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

Fecha:...../...../.....

Casa Vendedora.....

Sello y Firma:.....

El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.

Fabrica y garantía San Up S.A.:
Ruta 8 N°2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires, Argentina

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura de compra, de lo contrario no tendrá validez.

- Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Services Autorizados por San Up S.A.
- Durante la vigencia de la Garantía los gastos de traslados se regirán por la Ley 24,240.
- El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días a partir del período de cumplimiento efectuado por el usuario.

Para obtener la dirección de nuestros Servicios Técnicos Autorizados ingrese a www.sanup.com.ar o comuníquese con el Servicio de Atención al Consumidor al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200

VAPO 4510/R13/1418