

0+M

Aspirador Nasal de silicona

3278

- . Rápida y suavemente elimina la mucosidad de la nariz del bebé aspirando por la boca.
- . Pieza de la nariz y boquilla grado médico bicompatible.
- . Fácil de limpiar y fácil de llevar.
- . Bonito diseño.

Modo de uso:

- . Ponga a su bebé boca arriba en una mesa para cambiar pañales o sosténerlo en su regazo con la cabeza en las rodillas.
- . Inserte la pieza nasal suavemente por las fosas nasales del bebé y coloque la boquilla en la boca de la persona que está utilizando el aspirador. (ver Fig. 1)
- . Inhalar por la boquilla, comience lentamente y aumente en forma gradual la succión hasta que el moco es aspirado dentro del depósito del aspirador nasal.
- . Si el moco está demasiado seco o muy grueso, use un poco de solución salina para suavizar el moco antes de aplicar la succión.

Instrucciones de limpieza:

- . Limpiar las piezas con agua tibia y jabón después de cada uso.
- . Deje que las partes se sequen antes de volver a montarlo.

Advertencias:

- . No inserte la pieza nasal a la ventana de la nariz con demasiada profundidad.
- . No inserte el aspirador nasal en la boca o en las orejas del bebé.
- . No permita que los niños jueguen con el aspirador porque no es un juguete.
- . No esterilizar el aspirador con agua hirviendo, vapor o microondas.
- . No utilice el aspirador nasal si hay alguna herida, síntoma de inflamación o sangrado de la nariz.

