

Mini masajeador  
anatómico  
ERGO

3274

Programable para 6 modalidades de masaje.  
MANUAL DE INSTRUCCIONES



7 793647 000566

Importa y garantiza: San Up S.A.  
Ruta 8 N°2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires, Argentina  
Tel.: (54-11) 4754-4000 -Fax: (54-11) 4754-4004  
sanup@sanup.com.ar


SHENZHEN ODDX TECHNOLOGY CO., LTD

Atención al Consumidor  
0810-77-SANUP  
(72687)



VENTA LIBRE

1. Llave de Encendido (ON) / Apagado (OFF) del masajeador
2. Contenedor de las pilas del masajeador
3. Zona de masaje

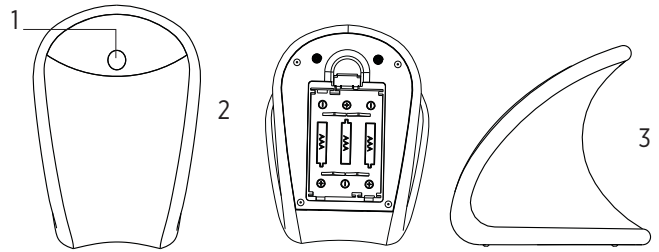

#### INSTRUCCIONES DE USO

Instale las pilas para el masajeador

- Presione el botón de encendido para iniciar el autoprograma. Presione el botón de nuevo para cambiar a otro programa. Presione el botón y sostenga durante 3 segundos para apagarlo.
- El masajeador se auto-apagará luego de estar funcionando continuamente durante 15 minutos y entrará en el modo de ahorro de energía.

#### PRECAUCIONES:

- No golpee el producto y evite los lugares con polvo, calurosos y húmedos.
- No coloque el producto dentro del agua. Si esto ocurre, séquelo con un paño suave y liso inmediatamente.
- No cambie la estructura interna del producto, en caso contrario la garantía se tornará inválida. Si el producto necesita mantenimiento, contacte al centro de ventas más cercano.
- Podría haber alguna diferencia entre la imagen y el producto real.
- No abandone el producto como desecho ordinario. Asegúrese de que este sea reciclado luego de un tratamiento especial.
- Cualquier duplicación de este manual del usuario no está permitida sin el permiso del fabricante.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones:

Masajeador: 99mm (largo) x 99mm (ancho) x 75mm (alto)

Peso del Masajeador: 220g (sin incluir las pilas)

Pilas Indicadas: 3 pilas AAA alcalinas



## GARANTÍA

Garantizamos este artefacto por el término de 6 meses contra todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

Fecha:...../...../.....

Casa Vendedora:.....

Sello y Firma:.....

El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.

Importa y garantiza San Up S.A.:  
Ruta 8 N°2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires, Argentina

**Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura de compra, de lo contrario no tendrá validez.**

- Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Servicios Autorizados por San Up S.A.
- Durante la vigencia de la Garantía los gastos de traslados se registrarán por la Ley 24,240.
- El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días a partir del periodo de cumplimiento efectuado por el usuario.

FOLL/79117/R01

Para obtener la dirección de nuestros servicios técnicos autorizados ingrese a [www.sanup.com.ar](http://www.sanup.com.ar) ó comuníquese con el Servicio de Atención al Consumidor al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200