

SAN-UP[®]
Baby

NUEVO



CHUPETE *para Nebulizar*

MODELO 3252

Se conecta a la ampolla/
manguera del nebulizador

Instrucciones Generales

- 1) Antes de usarlo por primera vez, coloque el chupete en agua hirviendo durante 5 minutos, déjelo enfriar y extraiga el agua que haya quedado en la tetina.
- 2) Conecte el chupete (Fig. A) a la ampolla (Fig. B), y esta última a la manguera del nebulizador a pistón. Coloque al bebé el chupete normalmente, sosteniéndole la ampolla en forma vertical, y proceda al nebulizado. El bebé debe estar sentado y no acostado. En el caso de usar con un nebulizador ultrasónico conecte el chupete a la manguera (Fig. C) en lugar de la máscara.



SAN-UP[®]


Chupete para conectar
al nebulizador

Atención al Consumidor
0810-77-SANUP
(72687)

Conozca más sobre
nuestros productos en
www.sanup.com.ar

Producido por: San Up S.A.
Ruta 8 N°2967 (B1651GVI)
San Martín, Buenos Aires,
Argentina - Industria Argentina

VENTA LIBRE
GARANTIA 1 AÑO

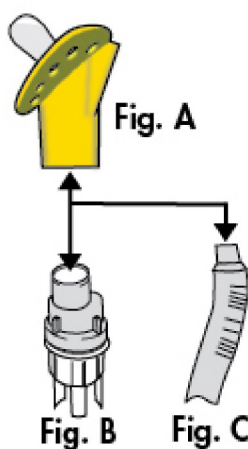

A.N.M.A.T.: P.M. 213-24

CE D.T. Farm.: Marta Camesella
LOT: XX-XXXX