

SAN-UP[®]

Balanza electrónica
Inteligente con multifunciones
con indicador de % de grasa corporal
Mod. FG220LB



LINEA CARDIOMETABOLICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



IMPORTANTE:

Para habilitar la garantía:

Registre su Producto

ingresando a:

www.sanup.com.ar

Registro de Producto y
complete el formulario.

Gracias

VENTA LIBRE



Manual de Uso

Precaución:

Indicaciones de seguridad:

Cuando se utiliza una balanza digital, se deben tomar ciertas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1.** La balanza Bluetooth no debe usarse para diagnosticar ni para tratar ninguna condición médica. Se recomienda consultar con un profesional de la salud al comenzar cualquier programa de dieta o ejercicio.
- 2.** Si está embarazada o tiene un marcapasos u otro dispositivo interno, no debe confiar plenamente en los resultados proporcionados por este producto. Los mismos son únicamente de referencia y no reemplazan bajo ningún concepto las indicaciones dadas por el médico.
- 3.** Si considera que el equipo está funcionando mal, como primera medida revise las pilas y reemplácelas en caso de que fuera necesario.
- 4.** Controle el equipo antes de cada uso y no lo utilice si el mismo se encuentra dañado. El uso continuo de una unidad dañada puede causar lesiones o arrojar resultados incorrectos.

Nota:

- 1.** La balanza es un dispositivo de medición de alta precisión. Nunca salte sobre la misma, ni pise con fuerza extrema el equipo, ni lo desarme. Manipule el dispositivo con cuidado para evitar roturas.
- 2.** Coloque la balanza sobre una superficie plana y dura durante su uso. No debe utilizarse sobre alfombras o pisos irregulares ya que puede verse afectada la precisión y arrojar resultados incorrectos.
- 3.** Para garantizar la precisión del peso indicado, pise suavemente la balanza para activar el sistema, aguarde al menos 10 segundos antes de pararse sobre el equipo.

También se debe activar la balanza si se ha movido. Se recomienda pesarse siempre a la misma hora todos los días, para garantizar la mayor precisión en las medidas de peso resultantes.

4. Cuando el equipo no esté en uso, retire las pilas y guárdelo en un lugar seco. Protéjalo del polvo, la humedad y el calor extremo, como también de la luz solar directa. Nunca coloque objetos pesados sobre el equipo.

5. Antes de usar la balanza, asegúrese de haber ingresado todos sus datos personales a través de la aplicación FITDAYS.

6. Párese siempre descalzo sobre la balanza, ya que no podrá medir los porcentajes de grasa si usa zapatos o medias.

7. Asegúrese de que sus pies estén secos antes de pesarse.

8. Esta balanza no es resistente al agua; por lo tanto, nunca la sumerja. Para limpiar la superficie, utilice siempre un paño húmedo. Nunca lo haga con jabón, químicos o sustancias abrasivas.

Especificaciones técnicas:

Medida: 30 x 26 cm

Peso: 1.0 kg

Pilas: 2 unidades de 1.5 V AAA

Capacidad: 3-180 kg

División: 100 g

Unidad de medida: kg

Rango de exactitud:

50kg:±0.3kg

100kg:±0.4kg

180kg:±0.5kg

Solución de problemas:

Normal



Normal
funcionamiento

No display

Cambio
de baterías



Calibrando





Cambio
de baterías



Sobrecarga

Para el peso corporal:

Coloque la balanza en una superficie uniforme y espere por lo menos 10 segundos antes de pararse sobre ella. El display debe mostrar 0,0 kg antes de pisar.

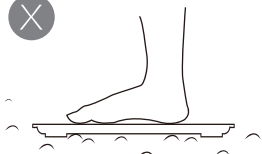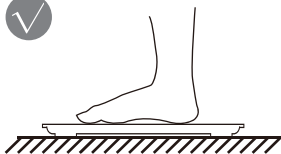

Para el análisis de grasa corporal y otros análisis de la composición corporal:

Párese derecho sobre la balanza y toque uniformemente los electrodos con la planta de los pies desnudos y secos como se muestra a continuación.



Zonas Conductoras


Instrucciones:

La balanza Bluetooth puede conectarse a su teléfono móvil (Android 6.0+ y IOS 8.0+) o iPad a través de Bluetooth 4.0. Descargar la aplicación "Fitdays" gratuita de App Store o Google Play.


Descargue la App e instale las baterías



Descargue FITDAYS
via App Store o
Google Play.

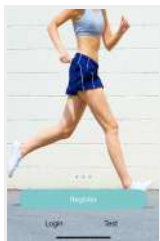


Registre sus datos
personales, y
confirme OK.

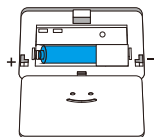

Instale las baterías.
Tenga en cuenta que las
baterías ofrecidas son de
prueba. Se recomienda
reemplazarlas cada 3
meses y retirarlas cuando
el equipo no vaya a usarse
por un tiempo prolongado.

Conexión de la balanza a su Smartphone

Encienda Bluetooth en su smartphone. La ubicación también debe ser activada para Android 6.0 o superior.

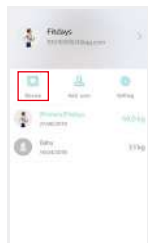

Presione "Dispositivo" y
Gestión de dispositivos
entrar a página de
medidas y buscar
dispositivo.



Encienda la balanza
y presione [+] seleccionar
"INSMART" para agregar
el dispositivo.



Vuelva a la página de
medidas. Suba a la balanza
y manténgase de pie
durante 5-10 segundos
con los pies descalzos. El
pesaje ha terminado una
vez que se lee en el display
el análisis de los datos
ingresados.

Ver informes, datos eliminados, establecer datos de referencia, compartir el progreso por reciente, semanal, mensual y anual.

Haga clic en el “Gráfico” para ver su historial de progreso. Agréguelo al calendario para armar una lista y seleccionar un conjunto de datos o todos los datos que desee Eliminar. También puede seleccionar datos de diferentes fechas para comparar y/o compartir con un amigo a través de Facebook, Instagram o SMS haciendo clic en el botón.





Date	Weight	BMI	Body fat
14.7 kg	18.2	18.2%	18.2%
20.0	20.0	20.0	20.0%
22.4 kg	22.4	22.4	22.4%
32.0	32.0	32.0	32.0%
38.2 kg	38.2	38.2	38.2%
40.7 kg	40.7	40.7	40.7%
44.0 kg	44.0	44.0	44.0%
47.2 kg	47.2	47.2	47.2%






En la parte inferior, encontrará una barra donde puede seleccionar diferentes tipos de datos para mostrar. Puede compartir sus datos de fitness con amigos a través de Facebook, Instagram o SMS haciendo clic en el botón compartir [+] y Compartir en la página de medición.



Agregar/Eliminar usuarios & Configuración básica

En "Míne" puede agregar usuario . Para eliminar una cuenta, deslice la cuenta hacia la izquierda y seleccione "Eliminar" Los temas, Establecer metas, Unidades de peso, Sonidos, idiomas y las contraseñas se pueden configurar en la página de configuración .

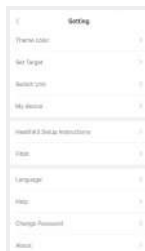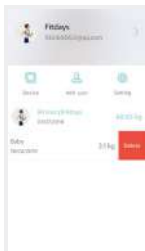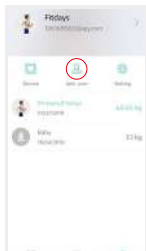


Sincronizar con la App de Fitness

♥ Salud de Apple


1. Abra la aplicación "Salud" en su iPhone, seleccione "Fuentes de datos".
2. Seleccione "Fitdays" de la lista.
3. Active todas las categorías para permitir que funcione la aplicación Fitdays.



1

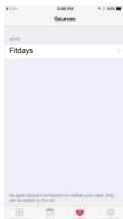


2

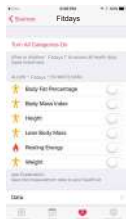


3

♥ Google Fit

1. Ingrese a la página Configuración "⚙️", seleccione "Google Fit".
2. Active el botón "Google Fit", inicie sesión en su cuenta de Google.
3. Ahora lo redireccionará automáticamente a la página "Google Fit".

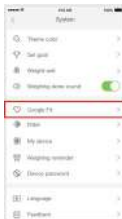

1

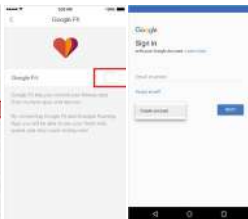

2-1



2-2




3



4

Fitbit App

1. Ingrese a la página Configuración "⚙️", seleccione Fitbit
2. Encienda el botón de Fitbit, inicie sesión en su cuenta de Fitbit.
3. Seleccione "Permitir" para acceder a la aplicación de Fitbit.
4. Después de la conexión, los datos (peso, porcentaje de grasa corporal, IMC) se sincronizarán en la App de Fitbit. Se podrá ver tanto en la aplicación como en la web.

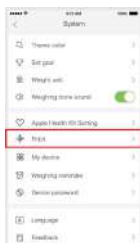

1



2-1



2-2



3



4-1




4-2

Mantenimiento

Recalibrar la balanza

Si la balanza se movió o se dio vuelta, debe recalibrarse para garantizar resultados precisos.

1. Coloque la balanza sobre una superficie plana y dura.
2. Párese en la balanza con un pie hasta que los dígitos aparezcan en la pantalla, luego bájese.
3. El display de la balanza mostrará "0.00", indicando que el proceso de calibración está completo.

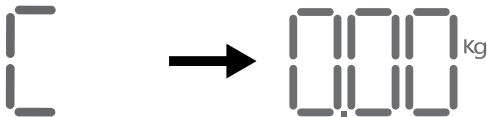

Preguntas y Respuestas frecuentes:

1. ¿Por qué no funciona la balanza? ¿Por qué los datos en pantalla desaparecen en un instante?

- Verifique que las baterías estén instaladas correctamente, y reemplácelas si lo considera necesario.

2. La balanza no se puede conectar con la App.

- Compruebe que el software del teléfono sea iOS 8.0 o superior o Android 6.0 o superior.

- Descargue y abra la versión más reciente de la App Fitdays.

- Habilite Bluetooth en su teléfono.

- Para Android 6.0 o superior la ubicación debe estar habilitada.

3. No mide la grasa corporal al pesar.

- Pisar con los pies secos y descalzos

- Asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado y funcionando.

- Asegúrese de ingresar los datos personales.

FCC Statement

El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2. A este dispositivo puede acceder cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de la Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia, energía y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que pueden causar intermitencias en el buen funcionamiento del equipo, el usuario puede tratar de corregirlas mediante las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

GARANTÍA
SAN-UP®

Garantizamos la balanza MODELO FG220 LB por el término de 1 año contra todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

Fecha:...../...../.....

Casa Vendedora:.....

Sello y Firma:.....

El distribuidor no se responsabiliza por eventuales daños producidos por: uso incorrecto del producto, roturas, maltrato o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.

IMPORTA Y GARANTIZA: SAN UP S.A
Ruta 8 N° 2967- San Martín- Pcia. Buenos Aires- Argentina

ESTA GARANTÍA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE LA FACTURA DE COMPRA, DE LO CONTRARIO, NO TENDRÁ VALIDEZ.

FOLL/79445/R00/0721

Importa, Distribuye y Garantiza: San Up S.A.
Ruta 8 N°2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires Argentina
Tel.: (54-11) 4754-4000 - Fax: (54-11) 4754-4004 - atencionalcliente@sanup.com.ar
Fabricado en República Popular China